



エラック 義歯洗浄剤

高機能性と使いやすさを追求した
顆粒タイプの義歯洗浄剤です。



顆粒だから実現した洗浄力とやさしさの両立


錠剤化剤や錠剤崩壊補助成分が不要な顆粒なので、義歯材料に穏やかな洗浄成分を高濃度に配合することができ、高い洗浄力でありながら義歯にやさしい組成を実現しました。

■ 活性酸素とタンパク分解酵素のダブルパワー 優れた洗浄・除菌・消臭力

- 活性酸素とタンパク分解酵素のダブルパワーで、義歯の着色汚れやデンチャープラークを除去し、義歯特有の臭いも消臭します。また、「カンジダ菌」、「フゾバクテリウム」等の真菌や細菌をしっかりと除菌して、義歯性口内炎や口臭の発生を防ぎます。
- 顆粒タイプなので、素早く洗浄力を発揮します。

■ 除菌力 (15分後)


Candida albicans (義歯性口内炎原因菌)	99.99%
Fusobacterium nucleatum (口臭原因菌)	99.99%
Streptococcus mutans (デンチャープラーク構成菌)	99.99%

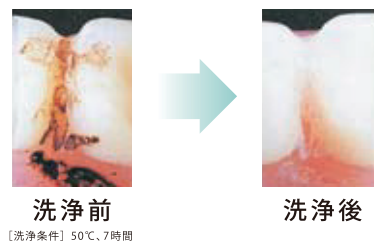

■ 金属保護成分と顆粒のやさしさ 極めて低い義歯材料への為害性

- 金属保護成分と義歯への為害性を抑えた洗浄成分を配合。レジン、金属、軟質材等多様な義歯材料の変色が極めて少ない組成です。

■ 義歯用金属に対する影響 (浸漬前後での色差)

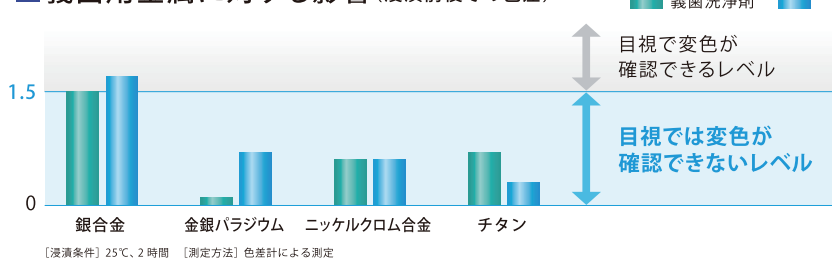

エラック義歯洗浄剤による義歯用金属の変色は、水とほぼ同等で、目視では確認できないレベルです。

■ 使いやすさの追求 計量キャップつきボトル

- 傾けるだけで1回分が出てくる計量キャップ付きなので、ささっと簡単に注げます。
- 錠剤のようにアルミ包装から取り出す手間がなく片手でも使えるので、指先の細かい動きが苦手な高齢者や片麻痺の方にも、お薦めいただけます。

片手でも使える
計量キャップ付き
ボトル



商品名	内装入数	メーカー希望患者様向け価格/個
エラック義歯洗浄剤	5個	980円

※ 価格には消費税は含まれておりません。

清潔な義歯で快適な毎日を！

義歯清掃には義歯洗浄剤とブラッシングの併用が効果的であることが確認されています。患者様に適切な義歯清掃習慣を身につけていただけるよう、エラック義歯ケア製品を是非お役立てください。

理想的な義歯清掃方法は 3ステップ洗浄

STEP

1



毎食後、こまめにブラッシング


- まず大まかな汚れを落とします。
- 義歯用ブラシを使うと効率よく清掃できます。
- 特に汚れやすいところは、ていねいに。



×力の入れ過ぎ、研磨剤配合歯磨剤の使用は禁物です。義歯を傷つける恐れがあります。

STEP

2

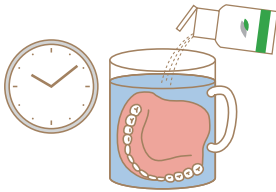

就寝時には、3ステップ洗浄でしっかり除菌・消臭

- ブラシで落としきれない細菌や真菌、臭いをしっかり洗浄します。予めブラッシングして汚れのバリアを除去しておくことで、洗浄剤がより効果的に働きます。
- 室温で3分～15分浸漬します。頑固な汚れには一晩浸け置きがおすすめ。
- ぬるま湯(40～50℃)ならより効率的。
- ×60℃以上のお湯は厳禁です。義歯を傷める恐れがあります。

STEP

3



- 仕上げに浮き上がった汚れと洗浄液をきれいに洗い流します。

義歯ブラッシングにおすすめ

エラック義歯ブラシらくらくスタイル


メーカー希望患者様向け価格/個 500円
※価格には消費税は含まれておりません。

- 特長1 効率よく清掃できる片面2ヘッド植毛
- 特長2 清掃性の高い、適度な硬さの密毛ヘッド
- 特長3 持ちやすいL字型ふっくらハンドル&広い指当て



義歯を使い始めたら 口腔粘膜のケアも忘れずに

義歯とご自身の歯はきちんとケアしているけれど、粘膜のケアは忘れていて、そんな患者様も多いようです。普段義歯で覆われている粘膜は、自浄作用が働きにくく、細菌や真菌が繁殖しやすい環境になりがちで、義歯性口内炎などの粘膜トラブルも起こりやすくなります。義歯を使い始めたら、口腔粘膜ケアの習慣を身につけていただけるよう、患者様にご指導ください。

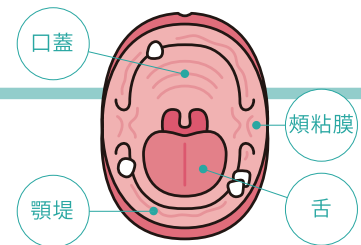


口腔粘膜ケア用ブラシ

エラック 510S / ES

メーカー希望患者様向け価格/個 320円
※価格には消費税は含まれておりません。

- 特長 大きめヘッドと軟らかい植毛の、口腔粘膜ケアのためのブラシ

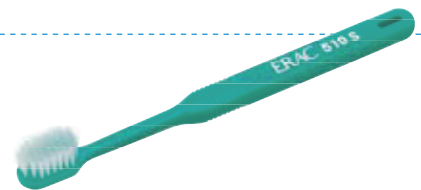

ライオン歯科材株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前 1-3-28 TEL.03.(6739)9012

ライオン歯科材 検索

<http://www.lion-dent.com>

株式会社モリタ